

ニューロパルスⅡ
(2チャンネルプログラム式)



ニューロパルス
(超小型)



温熱機能付きの電子治療器

ニューロパルス **ホット**



確かな継承
そして発展

大学病院等の協力により開発を行い、昭和55年からニューロパルスシリーズの製造販売を行っております。

ニューロパルスホット
(温熱機能付き)



温熱機能付きの電子治療器

ニューロパルスホット

皮膚の上から患部をあたため、神経線維にきわめて微弱な定電流パルスを流し、痛みやこり、麻痺の治療を行う温熱機能付きの電子治療器です。



特長

- 温熱機能付き
 - ・大型電極と大型パッドで患部全体を気持ちよくあたためます。
 - ・温熱は強弱切り替え可能です。
- 効果的な心地よい電気刺激
 - ・ニューロパルスより追求されてきた効果的で心地よい微小な両極性定電流パルスを採用しております。
 - ・患部をあたためながら電気刺激を与えることができますのでより効果的です。
 - ・当社独自のスローアップ通電波形の採用でソフトな刺激感が得られます。
- 効果的な刺激モード
 - ・治療の基本モード（たたく、もむ）の他に、治療部位別のプログラムモードを採用しております。
- オートパワーオフ
 - ・15分のタイマー付きです。自動的に電源がオフになります。

効能効果

- ・肩こり
- ・マッサージ効果（神経痛、筋肉痛の痛みの緩解、疲労回復、血行増進）
- ・末梢神経麻痺

使用方法

- ・指で押して気持ちのよいところ、痛むところ（圧痛点）、硬く感じるところ（硬結点）または、その両端にパッドを貼り、心地よいと感じる強さでご使用下さい。

仕様

刺激出力	1K Ω 負荷 10mA以下
刺激周波数	1.2~66Hz
刺激モード	6モード (肩、腰、ひじ/ひざ、足のうら、たたく、もむ)
あたため出力	強、弱切り替え付き
タイマー	15分オートパワーオフ
電源	単3乾電池3本、ACアダプター(10.5V、360mA)
外形	167×58×22mm
重量	約165g(乾電池含む)
医療用具承認番号	20900BZZ00317000
付属品	導子コード、専用ACアダプター、パッドホルダー、粘着パッド、乾電池、取扱説明書/保証書

製造元 ヒロセ電機株式会社

発売

お問い合わせ先

〒222-8566 神奈川県横浜市港北区菊名7-3-13
ヒロセ電機株式会社 ME事業課 TEL045 (402) 7714